

自社耐久テストで
5000万ショット*を
クリア!

New Arrival

パワーと耐久性を兼ね備えた
拡散型の圧力波治療器

PHYSISHOCK

[フィジショック]PS-1000

管理医療機器(クラスⅡ)/ 特定保守管理医療機器

一般的名称: 振動ヘッド付空気圧式マッサージ器 販売名: 振動ヘッド付マッサージ器 PS-1000

医療機器承認番号: 30700BZX00260000



*社内で実施した耐久テストによる結果です。標準ハンドピース(Φ15標準アプリケータ/3.0bar、21Hz)使用時。ただしアプリケータおよびピストンユニットの耐久回数は除く。

※画像はイメージです。実際の製品と異なる場合がございます。

<https://og-wellness.jp/>

Function

2つのハンドピースと豊富なアプリケーターで 汎用性の高い治療を実現

内部に圧力を発生させることで、効果的な刺激を生み出し、
筋肉や腱、軟部組織へ集中的にアプローチします。

標準 ハンドピース

手にフィットし、治療したい部位に**圧をかけやすい設計**です。
手元のボタンで、施術中に強度を調整できます。

V-Actor ハンドピース※

広範囲への治療、マッサージに。**セラピストの手技と組み合
わせる**ことで、施術の幅を広げます。

※V-Actor ハンドピースは一部のセット機種を除きオプションです。

※標準ハンドピースとV-Actor ハンドピースの両方から同時に刺激を出力することはできません。



標準ハンドピース
筋緊張の緩和、血流の改善に



オプション
V-Actor ハンドピース
リラクゼーション、血流の改善に

● 標準ハンドピース用アプリケーター



R15
φ15標準アプリケーター
刺激深度:0~40mm
エネルギー密度:0.304mj/mm²
※4.0bar時



D15
φ15ディープアプリケーター
刺激深度:0~60mm
エネルギー密度:0.504mj/mm²
※4.0bar時



D20
φ20アプリケーター
刺激深度:0~50mm
エネルギー密度:0.384mj/mm²
※4.0bar時

※このほか3種類のアプリケーターをオプションでご利用いただけます。

● V-Actor ハンドピース用アプリケーター



V25
φ25アプリケーター
組織のマッサージおよび
筋のスムーズングに



V40
φ40アプリケーター
広範囲の
筋トリートメントに

パワーにこだわった高出力設計と 精細な設定で様々な部位や症状に対応

標準ハンドピース使用時

刺激強度 最大 **5.0bar** 刺激頻度 最大 **21.0Hz**

※5.0barの場合、刺激頻度は最大12Hzまで、21Hzの場合、刺激強度は最大4.0barまで。

V-Actor ハンドピース使用時

刺激強度 最大 **4.0bar** 刺激頻度 最大 **31.0Hz**

国内生産だから アフターサービスも安心

国産のため定期的なメンテナンスや
アフターサポートもスピーディー。操
作方法やオプション品、消耗品に関する
ご相談もお気軽にお問い合わせいた
だけます。

アプリケーターや消耗品の収納に便利な
専用ワゴン(オプション)もあります。



リハビリテーション機器(理学療法・物理療法・作業療法・運動療法)・入浴機器(機械浴槽)の総合メーカー

OG Wellness

オージーウェルネス



【平日受付コールセンター】

☎ **0120-01-7181**

【休日受付コールセンター】※土・日・祝・年末年始 専用

☎ **0120-33-7181**

受付時間 9:00~17:00(平日・休日 共通)

<https://www.og-wellness.jp/>

営業所・支店

北日本支店(宮城・山形・福島)
札幌営業所(北海道)
盛岡営業所(岩手・青森・秋田)
北関東支店(埼玉・群馬・栃木・茨城)
新潟営業所(新潟)
南関東支店(東京・山梨)
横浜営業所(神奈川県)
千葉営業所(千葉)
中部支店(愛知・岐阜・三重・静岡・長野)

金沢営業所(石川・富山・福井)
関西支店(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)
神戸営業所(兵庫)
中四国支店(岡山・鳥取)
広島営業所(広島・島根・山口)
高松営業所(香川・愛媛・徳島・高知)
九州支店(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄)
鹿児島営業所(鹿児島・宮崎)

オージー技研株式会社

岡山本社 〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

東京本社 〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

取 扱 店