



入浴装置(介護浴槽)をお使いの皆様へ

専用の担架からの転落事故を防ぐために製品のご使用に関するお願い

拝 啓


平素はオージー製品をご愛用賜り、厚くお礼申し上げます。

この「お知らせ」は、弊社入浴装置による転落事故情報に基づき、事故発生を未然に防ぐための注意喚起を目的としています。本通知書はお手元の取扱説明書と一緒に保管いただければ幸いです。

またラミネートしていただくことで、ポスターとして浴室内でご活用いただくこともできます。

敬 具

【対象製品】

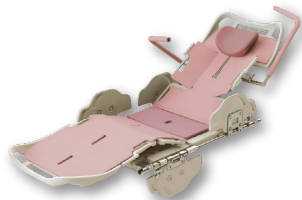

担 架

RA-312, RA-332, RA-345,
RA-355 (写真はRA-355S)



電動昇降型ストレッチャー

RA-190, RA-191, RA-181
(写真はRA-191)




アーチ型ストレッチャー

RA-161



転落事故の発生を未然に防ぐためには ～日常点検項目～

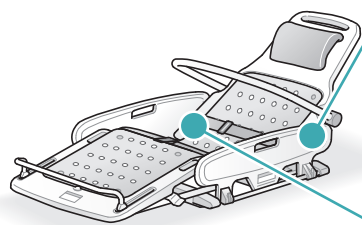

担架
(図は RA-332)

サイドフェンス


- ・サイドフェンスが確実にロック／解除できますか？
- ・サイドフェンスでぐらつく箇所がありませんか？
- ・サイドフェンスやロック解除レバーがスムーズに動きますか？

安全ベルト・固定用／調整用バックル

- ・安全ベルトにほつれ、切れかかりがありませんか？
- ・安全ベルトの通し方を間違えていませんか？
- ・固定用／調整用バックルに破損はありませんか？




転落事故の発生を未然に防ぐためには ～入浴介助時～

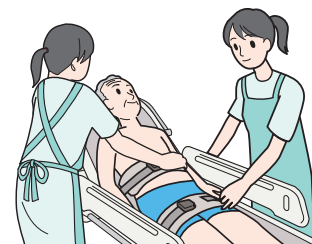

- ・入浴介助は、必ず2名以上で介助を行ってください。
- ・入浴者が担架に乗っている間は、入浴者から常に目を離さないでください。



- ・入浴者に担架の 安全ベルトを着用してください。

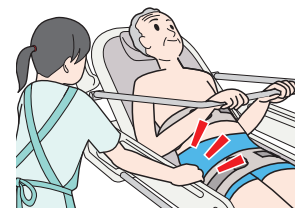

- ・担架のサイドフェンスを起こした後、確実にロックされていることを確認してください。
- ・入浴者が手すりを持っていることを確認してください。

尚、点検方法などの詳細は、取扱説明書をご確認ください。

もしも機器に何らかの異常が感じられた場合は、危険ですので直ちに使用を中止し、お買い上げ店、または最寄りの弊社事業所までご連絡ください。

また取扱説明書を紛失等お持ちでない場合には、お買い上げ店、または最寄りの弊社事業所までお問い合わせください。

オージー技研株式会社

www.og-wellness.jp

本社 〒703-8261 岡山市中区海吉1835-7 Fax. 050-1712-0447

平日受付コールセンター ☎ 0120-01-7181

・受付時間／9:00～17:00

休日受付コールセンター ☎ 0120-33-7181

・休日専用／土・日・祝・年末年始 ・受付時間／9:00～17:00